

ШВЕЙЦАРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ^{PM}

**ОТ АВТОРА
МЕТОДА
PIEZON[®]**

EMS 
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS

ИНСТРУМЕНТ SWISS INSTRUMENTS^{PM}

ТОЧНОСТЬ БЛАГОДАРЯ ДИЗАЙНУ



Инструмент PS
[увеличено 8x]

ИНСТРУМЕНТ SWISS INSTRUMENTS^{PM}

ТЕХНОЛОГИЯ PIEZON

ТЕХНОЛОГИЯ PIEZON[®] →

ШВЕЙЦАРСКИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ^{PM}

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ

ИНСТРУМЕНТЫ PIEZON[®]

ДЛЯ ПОЛНОЙ ГАММЫ

ПРИМЕНЕНИЙ

- ЭНДОДОНТИЯ
- СКЕЙЛИНГ
- ПЕРИО
- ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ
- РЕСТАВРАЦИЯ

**ЛУЧШИЕ ОБРАЗЦЫ ВЫСШЕГО
КАЧЕСТВА**

ЭНДОДОНТИЯ – ОТ КЛАССИЧЕСКИХ ДО УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫХ →

- ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА
- ОЧИСТКА КОРНЕВОГО КАНАЛА
- ЛАТЕРАЛЬНАЯ КОНДЕНСАЦИЯ ГУТТАПЕРЧИ
- СНЯТИЕ КОРОНОК, МОСТОВ, ШТИФТОВ
- УДАЛЕНИЕ КАЛЬЦИФИКАТОВ
- УДАЛЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ СЛОМАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
- РЕТРОГРАДНОЕ ПРЕПАРИРОВАНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ



ULTRA CLEAN
Очищающий и дезинфицирующий раствор для Piezon® Master 400/600 и других ультразвуковых аппаратов. Доступен не на всех рынках - свяжитесь с местным дилером для получения дополнительной информации

6 БУТЫЛЕЙ ПО 1000 мл} **MUC-006**



ИНСТРУМЕНТ RT1
Инструмент с алмазным напылением для обнаружения корневых просветов и удаления кальцификатов в коронковой трети системы корневых каналов

DS-066A



ИНСТРУМЕНТ D
Для снятия коронок, мостов и штифтов, установленных на фосфатный цемент

DS-005A



ИНСТРУМЕНТ RT2
Инструмент с алмазным напылением для удаления нависающих краев. Создает прямолинейный доступ к фрагментам сломанных инструментов

DS-067A



ИНСТРУМЕНТ H
Для латеральной термической конденсации гуттаперчи

DS-004A



ПЛОСКИЙ КЛЮЧ
Для смены инструмента во всех трех эндочаках

DT-018



ИНСТРУМЕНТ RT3
Очень длинный и тонкий инструмент для извлечения фрагментов сломанных инструментов. Используйте с эндочаком 180°

DT-062



180° ЭНДОЧАК
Для применения с инструментами RT3, Berutti и RE2

DS-069



ИНСТРУМЕНТ RT2
Инструмент для ретроградного препарирования шейки корневого канала. Поверхность покрыта нитридом титана для улучшения абразивных свойств. Используйте с эндочаками 120° или 180°

DT-061



120° ЭНДОЧАК
Обеспечивает гибкость применения различных эндо-файлов, особенно эффективен для передней и премолярной областей. Подходит также для инструментов RE2 и Berutti

DS-010



ИНСТРУМЕНТ BERUTTI
Инструмент с алмазным напылением для ретроградного препарирования корневых каналов. Коническая конструкция обеспечивает минимально инвазивный доступ и, следовательно, минимум постоперационных осложнений. Используйте с эндочаками 120° или 180°

DT-060



90° ЭНДОЧАК
Обеспечивает гибкость применения различных эндо-файлов, особенно эффективен для обработки корневых каналов моляров

DS-012



ИНСТРУМЕНТ ESI
Никель-титановые файлы с неагрессивной верхушкой для эффективной чистки и орошения системы корневых каналов

DT-069/A



СТАЛЬНЫЕ ФАЙЛЫ/К-ФАЙЛЫ/ ЭНДО-ФАЙЛЫ
К-файлы для чистки и дезинфекции системы корневых каналов [> Используйте файлы с эндочаками 90° или 120°]

6 эндо-файлов ISO 15 (белые)	DT-006
6 эндо-файлов ISO 20 (желтые)	DT-007
6 эндо-файлов ISO 25 (красные)	DT-008
6 эндо-файлов ISO 30 (синие)	DT-009
6 эндо-файлов ISO 35 (зеленые)	DT-010

1 комплект эндо-файлов ISO
15/20/25/30/35 мм, по 6 шт. каждого вида

DT-011

PIEZON® MASTER 600 →

ИСПОЛЗУЕТСЯ ПРИ БОЛЕЕ 20
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ПРОЦЕДУРАХ
С ТЕХНОЛОГИЕЙ PIEZON® - ОТ
СКЕЙЛИНГА ДО ПАРОДОНТОЛОГИИ И
ПРЕПАРИРОВАНИЯ ПОЛОСТЕЙ



ТЕЛЕЖКА

Для мобильного использования Piezon®
Master 600, со встроенным источником
питания

СЕРЕБРИСТАЯ}

MD907

БЕЛАЯ}

MD908




УДАЛЕНИЕ ФРАГМЕНТА СЛОМАННОГО ИНСТРУМЕНТА С ПОМОЩЬЮ ШВЕЙЦАРСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ™ RT1, RT2, RT3



ТЕХНОЛОГИЯ PIEZON® →


АБСОЛЮТНО ЛИНЕЙНЫЕ КОЛЕБАНИЯ

→ НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ТОЧНОСТЬ И МЯГКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ КАЖДОГО ИНСТРУМЕНТА
→ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР С
ПОСТОЯННЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ И ОБРАТНОЙ
СВЯЗЬЮ

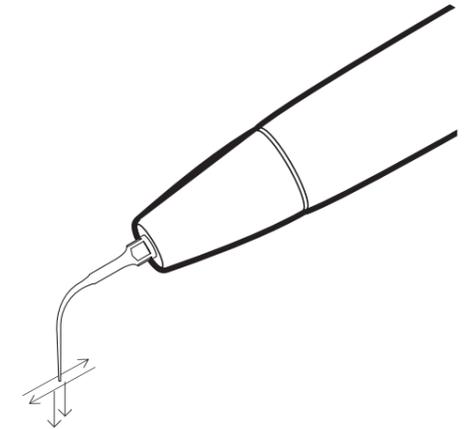

- > Гидродинамические эффекты - ключ к успеху при пародонтологическом и эндодонтическом лечении
- > Бактерицидное воздействие кавитации и акустических потоков

- > Сравнение корневых каналов, препарированных с помощью ручных инструментов (слева) и с использованием ультразвука по технологии Piezon® (справа)

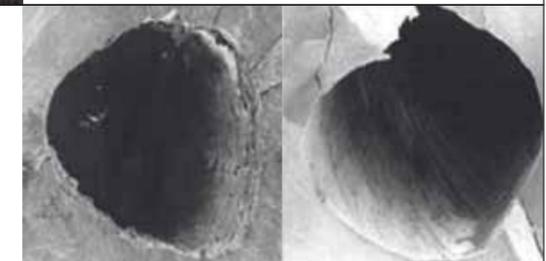

**ПРИ ЭНДОДОНТИИ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ПОВЕРХНОСТИ ИНСТРУМЕНТА ПОЗВОЛЯЕТ УДАЛЯТЬ
МЕЛЧАЙШИЕ ОБЪЕМЫ СУБСТАНЦИИ ЗУБА**



СКЕЙЛИНГ И ПЕРИО →

**ПРИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ДВИЖЕНИЯХ ИНСТРУМЕНТА
ВОЗДЕЙСТВИЕ МЯГКОЕ И БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ**



ИНСТРУМЕНТ А
Для удаления наддесневых отложений во всех квадрантах

DS-001 A



ИНСТРУМЕНТ Р
Для удаления наддесневых и поддесневых отложений во всех квадрантах

DS-011 A



ИНСТРУМЕНТ PS
Для удаления камней в глубоких пародонтальных карманах во всех квадрантах

“ИНСТРУМЕНТ EMS PERIO SLIM TIP ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОСТУП К МЕЖЗУБНЫМ ПРОМЕЖУТКАМ И ПОДДЕСНЕВЫМ КАРМАНАМ” – Информационный бюллетень CRA (Clinical Research Associates), США, июнь 1998

DS-016 A




ИНСТРУМЕНТ В
Для очистки лингвальных поверхностей со значительным налетом и камнями

DS-003 A



ИНСТРУМЕНТ С
Для удаления отложений и налета – особенно эффективен для удаления остатков связующего материала, т.е. при ортодонтии

DS-002 A

ЧИСТКА ИМПЛАНТАТОВ С ПОМОЩЬЮ PIEZON®




ИНСТРУМЕНТ PI
Для эффективной и аккуратной очистки имплантатов и соответствующих реставраций

ИСХОДНЫЙ КОМПЛЕКТ
4 инструмента PI
1 эндочак (120°)
1 плоский ключ **FS-295**

СМЕННЫЙ КОМПЛЕКТ
4 инструмента PI **DT-065 A**




ИНСТРУМЕНТ PL1
Инструмент с левосторонним изгибом для очистки и промывания пародонтальных карманов – особенно эффективен для труднодоступных межпроксимальных поверхностей

DS-030 A




ИНСТРУМЕНТ PL4
Инструмент с левосторонним изгибом и микрошариком [диаметр > 0,6 мм] на конце для обработки зоны разделения корней и вогнутых поверхностей

DS-033 A



ИНСТРУМЕНТ PL2
Инструмент с правосторонним изгибом, в остальном аналогичен инструменту PL1

DS-031 A



ИНСТРУМЕНТ PL5
Инструмент с правосторонним изгибом, в остальном аналогичен инструменту PL4

DS-034 A



ИНСТРУМЕНТ PL3
Инструмент для очистки и промывания пародонтальных карманов – особенно эффективен при контрольных посещениях

DS-032 A



ИНСТРУМЕНТЫ HPL3/DPL3
Перио инструменты с алмазным напылением для глубокой очистки корней с использованием прямого обзора [> “Flap”] – для сглаживания выступов при реставрации, а также для расширения зоны разделения корней

HPL3 70-µм} **DS-075 A**

DPL3 15-µм} **DS-065 A**



BacterX® → ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ РАСТВОР ХЛОРГЕКСИДИНА (0,2 %)

Со спиртом и без него поддерживает пародонтальное лечение. Доступен не на всех рынках – свяжитесь с местным дилером для получения дополнительной информации

ЦВЕТЫ ХАЙ-ТЕК



ШВЕЙЦАРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ^{PM} → СИСТЕМЫ С ПРЕИМУЩЕСТВАМИ

COMBITORQUE® →

УНИКАЛЬНЫЙ ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

- > уникальная комбинация динамометрического ключа и держателя инструмента
- > Безопасное и удобное хранение инструментов
- > значительное снижение риска повреждения тонких инструментов

КАЖДЫЙ ИНСТРУМЕНТ С СОБСТВЕННЫМ КЛЮЧЕМ COMBITORQUE®

- > Инструмент и ключ CombiTorque® стерилизуются вместе
- > врачу и ассистенту нет необходимости прикасаться к инструменту
- > Отсутствие риска повреждения насадки и перекрестной инфекции

→ СТИРИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ИНСТРУМЕНТА

STERIBOX →

ПОЛНОСТЬЮ СТИРИЛИЗУЕМЫЕ ПОДДОНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

- > удобное размещение и хранение инструментов
- > Стерильная подготовка к работе с учетом выполняемых процедур
- > Быстрый выбор инструмента при лечении
- > Два размера – в четверть или половину размера поддона – в зависимости от количества наконечников и инструментов
- > высокое качество обеспечивает длительный срок службы



ПРЕПАРИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ →



ИНСТРУМЕНТ SM
Инструмент с частичным алмазным напылением для препарирования полостей с мезиальной поверхности – без повреждений прилегающего зуба

DS -051 A



ИНСТРУМЕНТ SBm
Инструмент с частичным алмазным напылением для обработки краев полости в интерпроксимальной области с мезиальной поверхности

DS -060 A



ИНСТРУМЕНТ SD
Для препарирования полостей с дистальной поверхности. В остальном аналогичен инструменту SM

DS -052 A



ИНСТРУМЕНТ SBd
Инструмент с частичным алмазным напылением для обработки краев полости в интерпроксимальной области с мезиальной поверхности

DS -061 A



ИНСТРУМЕНТ PF
Инструмент с алмазным напылением для расширения фиссур

DS -062 A



ИНСТРУМЕНТ SB
Инструмент с алмазным напылением для расширения небольших кариозных полостей на щечной и окклюзионной поверхности

DS -057 A



ИНСТРУМЕНТ VE
Инструмент с алмазным напылением для обработки под винир - позволяет подготовить полость с четкими краями, обеспечивая максимальную защиту мягких тканей и соседних зубов

DS -064 A

РЕСТАВРАЦИЯ →



ИНСТРУМЕНТ E
Для уплотнения малых и средних пломб из амальгамы

DS -006 A



ИНСТРУМЕНТ G
Для сглаживания и полировки пломб из амальгамы и из золотой фольги

DS -008 A



ИНСТРУМЕНТ F
Для уплотнения больших пломб из амальгамы


DS -007 A



ИНСТРУМЕНТ SP
Для цементирования керамических накладок, накладок и виниров
[> без колпачка SP]

DS -015 A
6 КОЛПАЧКОВ SP } EL -063

ОРИГИНАЛЬНЫЙ
ШВЕЙЦАРСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ™ PL3 →

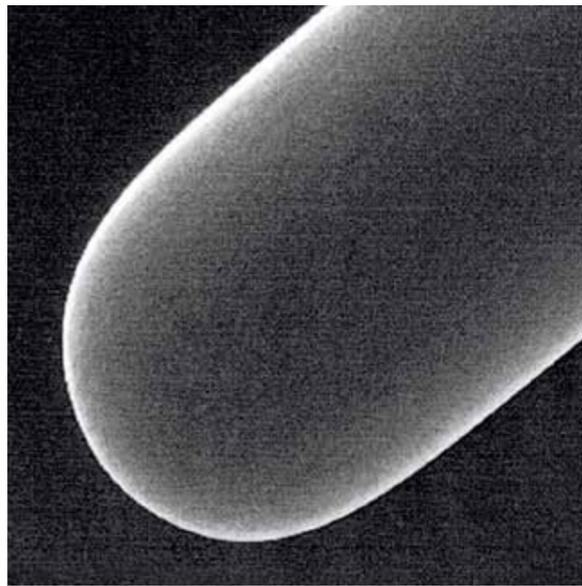

БЕЗ НАЗВАНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ИНСТРУМЕНТ →



УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕМОНСТРИРУЕТ ШВЕЙЦАРСКОЕ
КАЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТА EMS И ЕГО ОТЛИЧИЯ

- > Хирургическая сталь высшего качества с эксклюзивным сплавом EMS
- > Сложный производственный процесс, включающий до 31 технологического этапа
- > воспроизводимый характер колебаний благодаря прецизионному изготовлению
- > Гладкая поверхность в результате специального процесса полировки, обеспечивающего длительный срок службы
- > Проверка каждого инструмента

“ДЕШЕВАЯ ПОКУПКА МОЖЕТ ДОРОГО СТОИТЬ”

ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ
ИНСТРУМЕНТЫ
PIEZON® →


ДАЖЕ ЛУЧШИМ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ИНСТРУМЕНТАМ
СВОЙСТВЕНЕН НОРМАЛЬНЫЙ ИЗНОС

- > укорочен на 2 мм = потеря производительности на 50 %

РЕГУЛЯРНАЯ ЗАМЕНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАМЕТНОЕ
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

- > легкое удаление камней = экономия времени
- > лечение, не требующее усилий = удобство для врача
- > мягкое воздействие на ткани = комфорт пациента

ВАШ ИНСТРУМЕНТ PIEZON®
ТЕСТЕР ПОКАЗЫВАЕТ ЕГО СОСТОЯНИЕ →

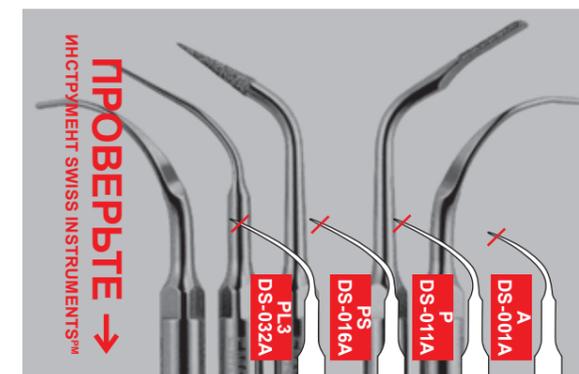



WWW.EMS-SWISSQUALITY.COM

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SA
Chemin de la Vuarpillière 31
CH-1260 Nyon

Тел. +41 22 99 44 700
Факс +41 22 99 44 701
welcome@ems-ch.com
www.ems-dent.com